


Ψηφιακό Φορητό Αλκοτέστ

Οδηγίες Χρήσης

KF-103AT


Περιγραφή προϊόντος

- Αισθητήρας: Προηγμένος αισθητήρας αλκοόλ (ημιαγωγός)
- Εύρος: 0.001-1.9% BAC & 0.0-1.9g/l (ή 0.00-0.95mg/l BRAC)
- Ακρίβεια: 0.01% BAC (0.1g/l)
- Χρόνος λειτουργίας:
 - Προθέρμανση: 15-30s
 - Απόκριση: <5s
- Αυτόματη απενεργοποίηση: περίπου 1 λεπτό
- Μπαταρία: 1.5V AAA*2
- Διαστάσεις: 100*45*20mm
- Βάρος: 20g

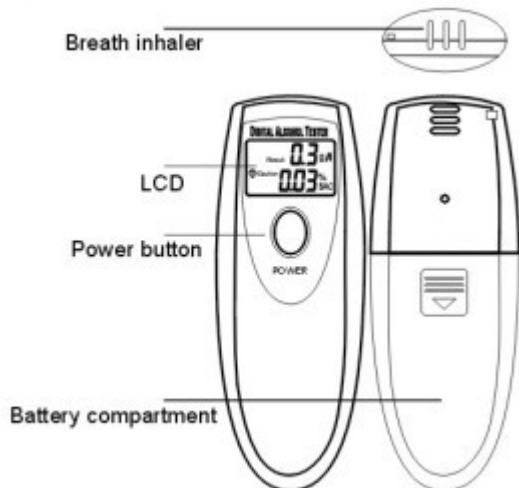


Φόρτιση μπαταρίας


1. Αφαιρέστε το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών από το πίσω μέρος της συσκευής.

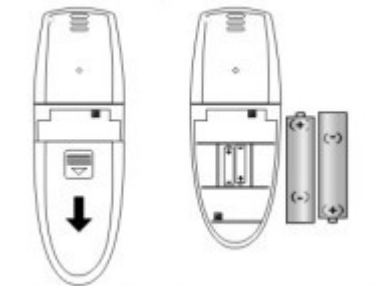

2. Τοποθετήστε δύο "AAA"(UM-4) αλκαλικές μπαταρίες ακολουθώντας το σχεδιάγραμμα για σωστή πολικότητα.
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι.

Οδηγίες χρήσης

 Πατώντας το κουμπί power μία φορά, η LCD οθόνη της συσκευής θα ανάψει κάνοντας έναν ήχο.

 Εμφανίζεται το σύμβολο “Warm up” (προθέρμανση), και θα αρχίσει μια αντίστροφη μέτρηση έως το 0, που υποδηλώνει ότι η συσκευή προθερμαίνεται.



Σημείωση:

* Εάν η προθέρμανση διακοπεί ή αποτύχει, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα και θα ξανακάνει προθέρμανση.

* Εάν ο αισθητήρας έχει πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί, ή είναι η πρώτη χρήση, πιθανόν να χρειαστεί πολλαπλές επανεκκινήσεις/προθερμάνσεις για να είναι έτοιμος για λειτουργία.

Τεστ:

1. Το σύμβολο “Blow” (φυσήξτε) εμφανίζεται αφού ολοκληρωθεί η προθέρμανση, και ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση έως το 0, που υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία ελέγχου.




2. Πλησιάστε το ακροφύσιο της συσκευής στο στόμα σας και φυσήξτε για 3 -5 δευτερόλεπτα..

3. Διαβάστε το αποτέλεσμα του ελέγχου στην LCD οθόνη.

4. Το σύμβολο “Caution” (προσοχή) θα εμφανιστεί εάν η συγκέντρωση αλκοόλ είναι στα εξής επίπεδα:

0.02%BAC(ή 0.2g/l) to 0.05%BAC(ή 0.5g/l)

0.05% BAC(ή 0.5g/l) to 0.08% BAC(σή 0.8g/l)

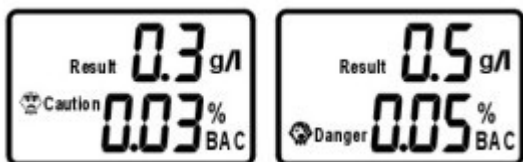


5. Το σύμβολο “Danger” (κίνδυνος) θα εμφανιστεί, συνοδευόμενο από προειδοποιητικό ήχο εάν η συγκέντρωση αλκοόλ είναι στα εξής επίπεδα:

Ισο ή περισσότερο από 0.05%BAC(ή 0.5g/l)

Ισο ή περισσότερο από 0.08%BAC(ή 0.8g/l)

Αυτόματη απενεργοποίηση

1. Αφού το αποτέλεσμα του ελέγχου εμφανιστεί για περίπου 8 δευτερόλεπτα, το σύμβολο “OFF” θα εμφανιστεί για 2-3 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα σβήσει.

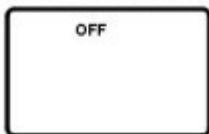

2. Εάν η προθέρμανση αποτύχει ή διακοπεί, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.
3. Εάν δεν φυσήξετε στο ακροφύσιο μέσα στα 10 δευτερόλεπτα της αντίστροφης μέτρησης στη λειτουργία ελέγχου, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

Σημείωση

*Για μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα, ο κατασκευαστής συνιστά να επαναληφθεί η διαδικασία ελέγχου 2 ή 3 φορές.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Αντικαταστήστε τις 2 AAA μπαταρίες όταν δείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν μπορεί να ανάψει.

Χρήσιμες οδηγίες

- Μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνιστάται να περιμένετε περίπου 20 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, καθώς αυτός είναι περίπου ο χρόνος που χρειάζεται το αλκοόλ για να απορροφηθεί στο αίμα από το πεπτικό σύστημα.. Περίπου τόσο χρειάζεται και τυχόν υπόλειμμα αλκοόλ στο στόμα για να εξασθενίσει.
- Για ακριβέστερα αποτελέσματα , αφήστε να περάσουν περίπου 3 λεπτά μετά από κάθε μέτρηση πριν επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Μην καπνίζετε και καταναλώσετε τροφή για περίπου 20 λεπτά πριν το τεστ.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην φυσήξετε υγρά μέσα στο ακροφύσιο.
- Μην χρησιμοποιείτε έντονες χημικές ουσίες κοντά στη συσκευή (πχ μιογιές, εντομοκτόνα κτλ.)
- Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε πολύ κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.
- Η μέτρηση της συσκευής δίνει αποτελέσματα μόνο για προσωπική χρήση, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μέτρηση σε νομικό επίπεδο.

